

Formstabile Kontaktlinsen

appenzeller
kontaktlinsen®
passt.

i-NIGHT

Nachts tragen – tagsüber sehen:
Ohne Brille, ohne Linsen.



Orthokeratologie
auf höchstem Niveau



passt.

Nachts tragen – tagsüber sehen:



Ohne Brille, ohne Linsen.

Kontaktlinsen tragen Sie am Tag –
um besser zu sehen.

**Nachtlinsen tragen Sie in der Nacht –
um am Tag besser zu sehen.**

Die Nachtlinsen sorgen dafür, dass die Krümmung der Hornhaut beim Schlafen sanft umgeformt wird. Eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Auges ist dank erstklassigem Herstellungsmaterial garantiert. Bei geschlossenen Lidern ist die i-NIGHT kaum zu spüren und deshalb auch bei Kontaktlinsenunverträglichkeit einsetzbar.

Durch den Effekt nimmt die Kurzsichtigkeit ab bzw. wird korrigiert. Das ist vor allem bei Kindern mit fortschreitender Myopie ein entscheidender Faktor.


Dank der i-NIGHT gehören Einschränkungen bei Arbeit oder Sport durch Linsen oder Brille der Vergangenheit an. Der Alltag wird dadurch definitiv sorgloser. Auch zusätzliche Linsen oder eine Brille sind überflüssig, was sich positiv auf die Kosten auswirkt.

Die Vorteile:

- Gute Alternative zur chirurgischen Myopie-Korrektur
- Keine gereizten Augen, kein Staub unter den Linsen
- Keine Probleme bei Heuschnupfen, kein Fremdkörpergefühl
- Wirkt bereits nach 6 Stunden Schlaf, hält den ganzen Tag
- Ökologisch sinnvoll: Jahreslinsen sparen Verpackung
- Das Verfahren ist reversibel
- Sehr gut geeignet auch für Kinder: Sie lassen ihre Brille nicht liegen und verlieren ihre Linsen nicht

Tagsüber


volle Sehkraft ohne Linsen und ohne Brille

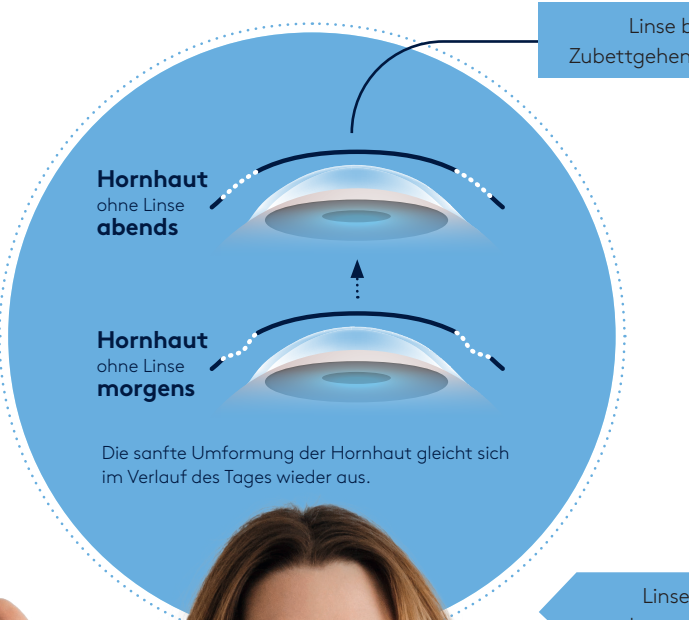

Nachts

gehen Sie mit Ihren Linsen ins Bett

beim
einsetzen

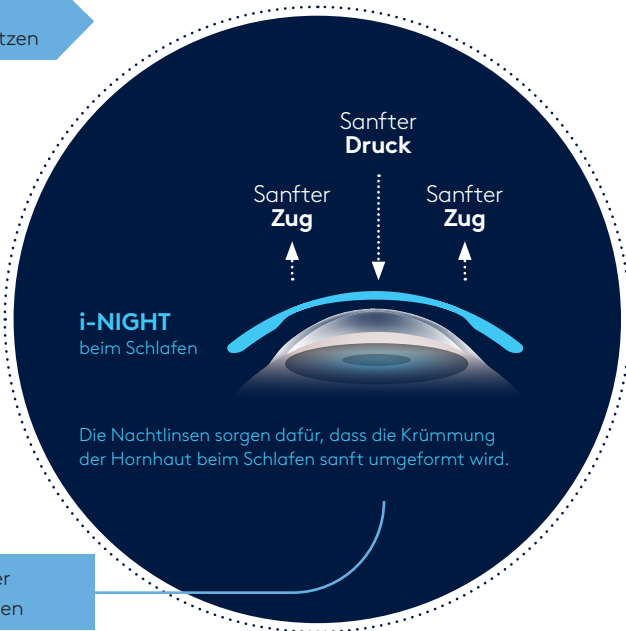

wieder
annehmen





Die Kontaktlinse, die Ihnen Freiheit schenkt – totale Freiheit...

Warum Kontaktlinsen?

Damit Sie besser sehen. Nein – damit Sie perfekt sehen. Nicht einfach nur scharf, sondern ohne jede Einschränkung.

Eine Brille mag gut aussehen. Eine Brille mag Sie gut aussehen lassen. Aber auch das schönste und edelste und teuerste Designermodell kann es mit Kontaktlinsen nicht aufnehmen. **Denn: Kontaktlinsen schenken Ihnen Freiheit – die totale Freiheit.** Weil keine Fassung und kein Bügel und kein Brillenglas Ihren Blickwinkel einschränkt. Und weil Sie Kontaktlinsen bei Arbeit, Sport und Spiel tragen können. Ohne jede Einschränkung.

Warum Kontaktlinsen nach Mass?

Höchstwahrscheinlich tragen Sie keine massgeschneiderten Kleider. Und auch keine massgeschneiderten Schuhe. **Warum also sollten Sie sich den Luxus massgefertigter Kontaktlinsen leisten?** Bei Kleidern und Schuhen spielt es keine Rolle, ob sie ein paar Zentimeter oder Millimeter zu klein oder zu gross sind. Bei Kontaktlinsen sind Massseinheiten entscheidend, die von blossen Auge nicht wahrnehmbar sind. **Noch ein gravierender Unterschied:** Bei Tages- und

Monatslinsen muss sich das Auge der Linse anpassen. Bei Linsen nach Mass ist es umgekehrt: Sie werden Ihrem Auge angepasst.

Warum in der Nacht?

Die Nachtlinse trocknet das Auge kein bisschen aus und Sie spüren sie beim Schlafen nicht. Nachts ist zudem der Verlust einer Linse sehr unwahrscheinlich.

Warum vom Augenoptiker oder Augenarzt?

Appenzeller Kontaktlinsen bekommen Sie einzig und allein bei Ihrem Augenoptiker oder Augenarzt. Aus guten Gründen: Ihr Augenoptiker oder Ihr Augenarzt ist auf Kontaktlinsen spezialisiert. Er hat die nötigen Aus-/Weiterbildungen absolviert. Er weiss deshalb ganz genau, welche Art von Kontaktlinsen für Sie und Ihre Augen die richtigen sind. Und er hat die Erfahrung und die Geduld, um sie exakt Ihren Augen anzupassen. **Bis auch Sie sagen: Appenzeller Kontaktlinsen – passt.**

...wenn sie richtig eingesetzt
und gepflegt wird.

Handhabung und Pflege der Linse

Um Komplikationen wie zum Beispiel Irritationen oder Infektionen des Auges zu vermeiden, müssen die Ortho-K-Linsen sorgfältig eingesetzt und gepflegt werden.

Vorbereiten

Sauberkeit ist der erste und wichtigste Schritt: Vor dem Anpassen der Linsen müssen die Hände absolut sauber sein.

- Verwenden Sie Einwegtücher, damit keine Keime oder Bakterien auf Ihre Linsen kommen.
- Vermeiden Sie cremige Seifen, Lotionen oder ölige Kosmetika.
- Beginnen Sie immer mit der gleichen Linse, um Verwechslungen zu vermeiden.

Einsetzen

Befolgen Sie folgende Schritte, um die Linse auf das Auge zu setzen:

- Spülen Sie die Linse mit Kochsalzlösung ab.
- Legen Sie die Linse auf Ihren Zeigefinger.
- Füllen Sie die Linse mit einigen Tropfen Kochsalzlösung.
- Platzieren Sie sie vorsichtig in die Mitte Ihres Auges.
- Zwinkern Sie vorsichtig und ohne Druck.

Herausnehmen

Wenn die Linse am Morgen am Auge festsitzt:

- Geben Sie 2-3 Tropfen Kochsalzlösung in das Auge.
- Warten Sie, bis sich die Linse mit den Lidschlägen freibewegt.
- Erst jetzt können Sie die Linse vom Auge nehmen.

Reinigen und aufbewahren

Eine Ortho-K-Linse ist nur dann wirkungsvoll, wenn sie gründlich gereinigt und sicher aufbewahrt wird:

- Reinigen Sie die Linse ca. 20 Sekunden lang mit dem Reiniger von Appenzeller Kontaktlinsen.
- Spülen Sie sie anschliessend sorgfältig mit der Kochsalzlösung aus unserem Pflegesortiment ab.
- Desinfizieren und neutralisieren Sie die Linse mit dem Peroxydsystem von Appenzeller Kontaktlinsen.
- Die grossen Körbchen des Peroxydsystems sind ideal für die Aufbewahrung Ihrer Ortho-K-Linsen.



passt.

Mehr Informationen unter
www.i-night.ch

Schweiz

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Hauptstrasse 22
CH-9042 Speicher AR
Telefon 071 344 20 00

Deutschland

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Kemptener Strasse 8
D-88131 Lindau
Telefon 0800 9042 9042 (gratis)

Österreich

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Postfach 29
A-6973 Höchst
Telefon 0800 9042 9042 (gratis)

www.appenzeller-kontaktlinsen.ch

info@appenzeller-kontaktlinsen.ch



Formstabile
Kontaktlinsen

i-NIGHT

© Appenzeller Kontaktlinsen AG | Subject to copyright 2007-1-04
All trademarks are the property of Appenzeller Kontaktlinsen.
® Wir tragen als Unternehmen Sorge zur Natur und
haben eine Verpackungslizenz vom Grünen Punkt.